

## REINIGING EN ONDERHOUD

- 1.Reinig het apparaat eens per week of vaker wanneer door meerdere gebruikers gehanteerd.
- 2.Veeg het apparaat af met een zacht, vochtig doekje met wat medische alcohol, om kruisbesmetting te voorkomen. Giet de alcohol niet direct op of in het apparaat. Droog het apparaat met een zacht doekje of laat het aan de lucht drogen.
- 3.Laat dit apparaat niet op harde oppervlaktes vallen.
- 4.Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen, om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- 5.Als dit apparaat wordt opgeborgen in temperaturen lager dan 0 , laat het apparaat dan vóór gebruik acclimatiseren tot op kamertemperatuur.
- 6.Probeer dit apparaat niet te demonteren.
- 7.De PO3M is een zeer nauwkeurig elektronisch instrument en moet worden gerepareerd/onderhouden door een geautoriseerd iHealth servicecentrum.
- 8.Incorrecte vervanging van de batterij door personeel met een tekort aan training kan tot onacceptabele risico's leiden (bijv. te hoge temperaturen, brand of ontploffing).
- 9.De patiëntsimulator « Index 2 », gemaakt door het bedrijf Fluke, kan worden gebruikt om de werking van de oximeter te verifiëren.
- 10.De verwachte levensduur van de PO3M is ongeveer 5 jaar.