

## Onderhoud

1. ! Laat deze meter niet vallen of stel hem niet bloot aan een sterke impact.
2. ! Vermijd een hoge temperatuur of blootstelling aan de zon. Dompel de meter niet onder in water aangezien dit de meter zal beschadigen.
3. Als deze meter wordt opgeslagen in temperaturen rond het nulpunt, laat deze dan voor gebruik eerst tot kamertemperatuur komen.
4. ! Probeer deze meter niet te demonteren.
5. Als u de meter langdurig niet gebruikt, verwijder dan de batterijen.
6. Het wordt aanbevolen om de productprestaties om elke 2 jaar of na elke reparatie te controleren. Neem contact op met het servicecentrum.
7. Maak de meter schoon met een droge, zachte doek of een zachte, goed uitgewrongen zachte doek met water, verdunde desinfectiealcohol of verdund detergent.
8. De gebruiker kan op geen enkel onderdeel in de meter onderhoud uitvoeren. De schakelschema's, onderdelenlijsten, beschrijvingen, kalibratie-instructies of andere informatie die het technisch personeel van de gebruiker met de juiste kwalificaties zal helpen de onderdelen die geschikt zijn voor reparatie te repareren, kunnen geleverd worden.
9. De meter kan de veiligheids- en prestatie-eigenschappen minimaal 10.000 metingen of gedurende een periode van drie jaar behouden en de manchet gaat minstens 1.000 open- en sluitcycli mee.
10. We raden aan om de manchet elke week 2 keer te desinfecteren indien nodig (bijvoorbeeld in een ziekenhuis of kliniek). Veeg de binnenkant (de kant die met de huid in contact komt) van de manchet met een zachte doek die licht bevochtigd is met ethylalcohol (75-90%). Laat de manchet vervolgens drogen.

! staat voor "WAARSCHUWING"