
















Waarschuwing

-  Lees de instructies grondig door voordat u een digitale thermometer gebruikt.
-  Verstikkingsgevaar: de thermometer en de batterij kunnen dodelijk zijn als ze worden ingeslikt. Laat kinderen dit apparaat niet gebruiken zonder ouderlijk toezicht.
-  Gebruik geen thermometer in het oor. Ontworpen gebruik is alleen voor orale, rectale en oksel (oksel) metingen.
-  Plaats de batterij van de thermometer niet in de buurt van extreme hitte, omdat deze kan exploderen.
-  Opmerking: Het gebruik van de sondehoes kan resulteren in een afwijking van 0,1 ° C (0,2 ° F) ten opzichte van de werkelijke temperatuur.
-  Verwijder de batterij uit het apparaat wanneer deze lange tijd niet wordt gebruikt.
-  Het gebruik van temperatuurmetingen voor zelfdiagnose is gevaarlijk. Raadpleeg uw arts voor de interpretatie van resultaten. Zelfdiagnose kan leiden tot verergering van bestaande ziekte toestanden.
-  Voer geen metingen uit wanneer de thermometer nat is, aangezien dit tot onnauwkeurige metingen kan leiden.
-  Bijt niet op de thermometer. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot breuk en / of letsel.
-  Probeer de thermometer niet uit elkaar te halen of te repareren. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot onnauwkeurige metingen.
-  Desinfecteer na elk gebruik de thermometer, vooral als het apparaat door meer dan één persoon wordt gebruikt.
-  Forceer de thermometer niet in het rectum. Stop het inbrengen en stop de meting als er pijn aanwezig is. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel.
-  Gebruik de thermometer niet oraal na rectaal gebruik.
-  Gebruik de apparaten niet oraal voor kinderen van twee jaar of jonger.
-  Als het apparaat is opgeslagen bij temperaturen van meer dan 5 ° C ~ 40 ° C (41 ° F ~ 104 ° F), laat het dan ongeveer 15 ° C ~ 40 ° C (41 ° F ~ 104 ° F) omgevingstemperatuur minuten voor gebruik.