

ZORG EN ONDERHOUD

1. Laat de meter niet vallen en stel het niet bloot aan sterke impacts.
2. Vermijd hoge temperaturen en directe blootstelling aan de zon. Dompel de meter niet onder water.
3. Laat de meter, indien opgeslagen bij koude temperaturen, op kamertemperatuur komen voor gebruik.
4. Probeer deze meter niet te demonteren.
5. Verwijder de batterijen indien u de meter langere tijd niet gebruikt.
6. Het wordt aangeraden de werking van de meter iedere 2 jaar te controleren.
7. Reinig de monitor met een droge doek. Gebruik geen schuurmiddelen of vluchtige schoonmaakmiddelen.
8. De leverancier zal op verzoek de schakelschema's, de onderdelenlijsten, beschrijvingen, afstelinstructies of andere informatie die het toepasselijk technisch gekwalificeerde personeel van de gebruiker kunnen bijstaan om de vooraf door de fabrikant bepaald als repareerbare onderdelen te repareren, beschikbaar stellen.
9. Indien de manchet in een ziekenhuis of kliniek wordt gebruikt, wordt aangeraden deze twee keer per week te desinfecteren. Veeg de binnenkant van de manchet (het gedeelte dat contact maakt met de huid) schoon met een zachte, licht met Ethyl alcohol (75-90%) bevochtigde doek. Laat de manchet drogen.
10. De meter kan voldoen aan de veiligheids- en prestatiekenmerken gedurende minimaal 10.000 metingen of driejarig gebruik, en de ongeschonden toestand van de manchet blijft behouden na 1.000 open en sluit handelingen van de sluiting.